

Identification :

IN.BM./019

Version : A

Date d'application :

Mai 2004

Page : 1/5

OBJET :

Cette instruction définit l'utilisation du Tensiomètre à brassard poche Clinic 3

DESTINATAIRES POUR APPLICATION :

- Sapeurs Pompiers
- Médecins SP
- Infirmiers SP

DESTINATAIRES POUR INFORMATION :

- Direction
- Médecin Chef
- Formation

DEFINITIONS :

DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES :

DOCUMENTS DE REFERENCE :

SOMMAIRE :

- Tableau des modifications ---Page 2/5
- I – Présentation de l'appareil ---Page 3/5
- II – Utilisation ---Page 4/5 et 5/5

Annexes

RESPONSABILITES :

REDACTEURS

(Toute personne demandant la rédaction d'un document)

Service /Fonction : SSSM

Nom : GRANGER Christophe

Date : 08.04.04.

Visa :

Nom : SARAIVA Patricia

Date : 08/06/04

Visa :

VERIFICATEUR

(toute personne dans le domaine de compétence)

Service /Fonction : PUI



Nom : COLLADO Eric

Date : 08/04/2004

Visa :

APPROBATEURS

(Valide et approuve)

Chef du Groupement	Directeur Départemental
S.S.S.M	
Date : 16/05/04	Date : 17/05/04
Visa :	Visa :
	
	<p>Pour le directeur départemental et par délégation, le directeur adjoint</p> <p>Le Colonel Jérôme C.</p>



INSTRUCTION

UTILISATION du TENSIOMETRE à brassard poche Clinic 3

Identification :

IN.BM./019

Version : A

Date d'application :

Mai 2004

Page : 2/5

TABLEAU DES MODIFICATIONS

Raison de la modification (règlementation, changement d'organisation...)	Date	Version et Page	Paragraphes modifiés
---	-------------	------------------------	-----------------------------

Identification :

IN.BM./019

Rédigé par :

Christophe GRANGER
Patricia SARAIVA

Vérifié par :

Pharmacien Capitaine Eric COLLADO

Date d'application :

Mai 2004


Version : A

Page : 3/5

OBJET

Cette instruction définit l'utilisation du Tensiomètre à brassard poche clinic 3

I – PRESENTATION DU TENSIOMETRE A BRASSARD :

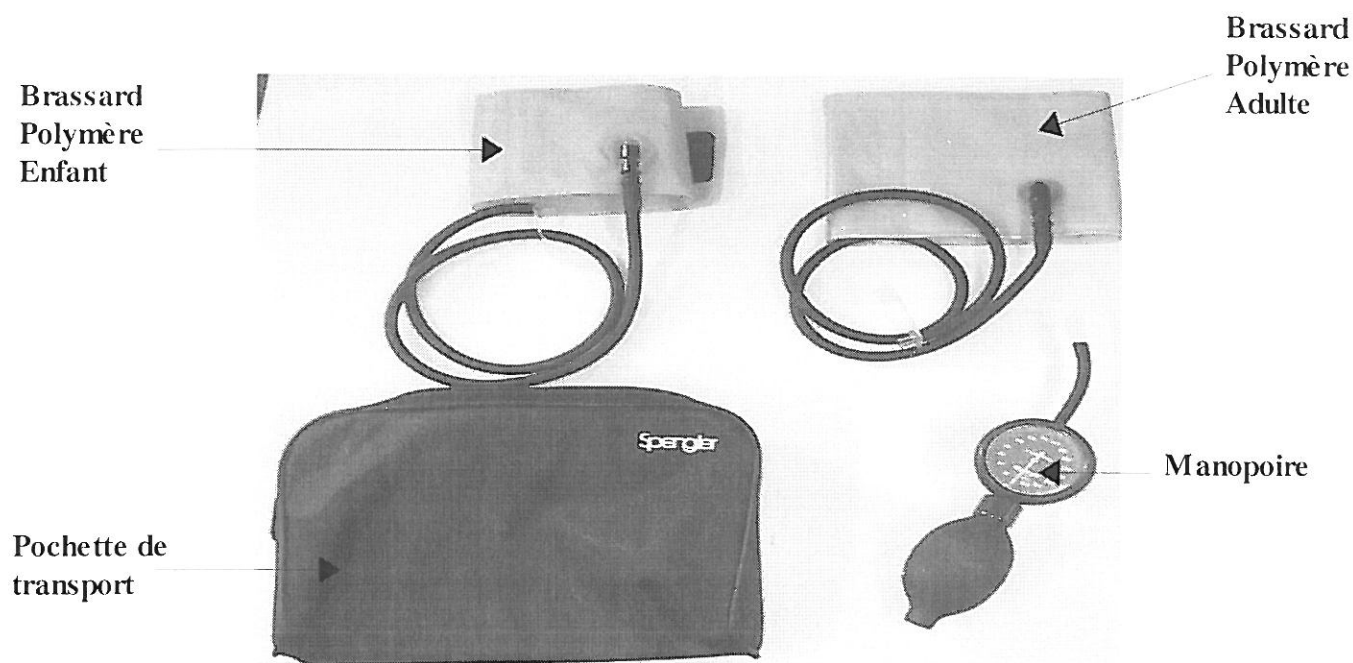

Les tensiomètres à brassard poche clinic 3 sont recommandés par la préventions des infections croisées. Ils sont présentés dans une pochette de transport.

Les tubulures

- sont en PVC avec connecteur rigide mâle/femelle type Luer Lock
- présentent un système d'obturation intégré pour la désinfection par immersion

Identification :

IN.BM./019

Version : A


Date d'application :

Mai 2004


Page : 4/5

II – UTILISATION :


– Prendre le brassard Choisi

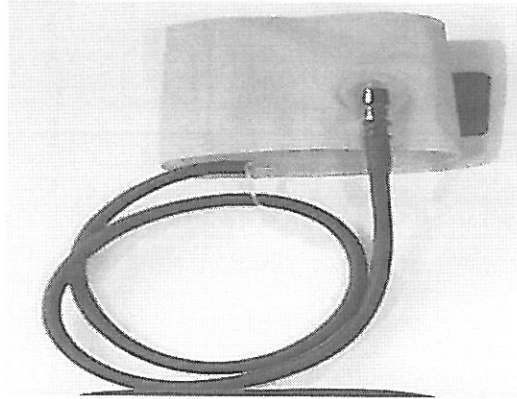

– Prendre le manopire

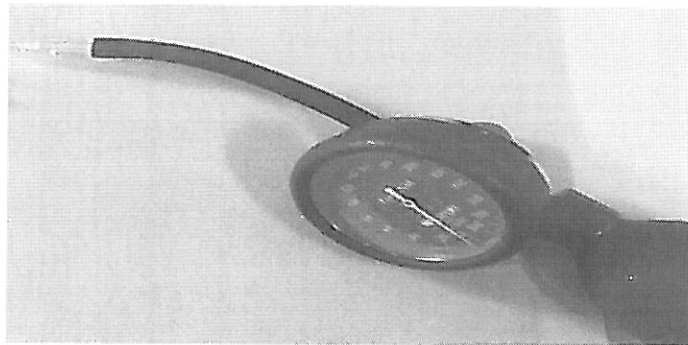

- Connecter le manopire au brassard au niveau du connecteur rapide pour cela
* présenter les deux connecteurs

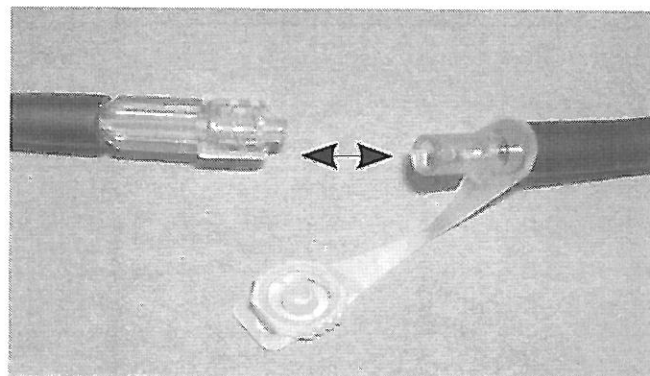

Identification :

IN.BM./019



Version : A

Date d'application :

Mai 2004

Page : 5/5

* les relier (**ATTENTION** : *NE PAS FORCER*)

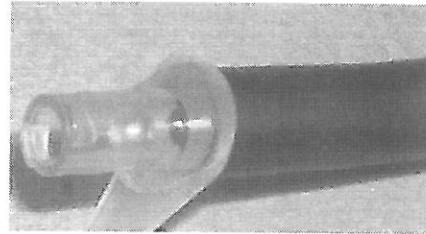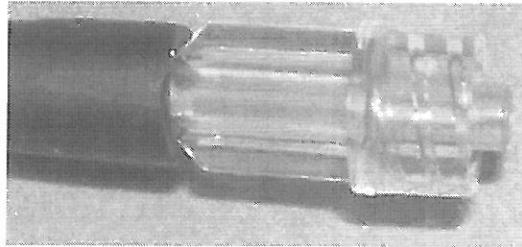

- Positionner le brassard en mettant l'index artère sur l'intérieur
- Pratiquer la mesure

CHANGEMENT DE BRASSARD :

- Faire 1 quart de tour vers la gauche pour séparer les connecteurs Luer Lock (**ATTENTION** : *NE PAS FORCER*)
- Répéter toutes les étapes à chaque utilisation